



NÁVOD K POUŽITÍ

StopBac STERILE je hypoalergenní antibakteriální sterilní adhezivní kryt ran nové generace k jednorázovému ošetření drobných poranění i hlubších ran. Aktivní zóna polštářku využívá unikátních nanotechnologických řešení a obsahuje mj. aktivní ionty stříbra. Vedle kvalitního krytí rány a jejího okolí tak poskytuje vysoce účinnou antibakteriální ochranu, tedy razantně redukuje výskyt bakterií a brání průniku vnější bakteriální infekce. Zásadním omezením rizika vzniku sepse tak náplast StopBac významně přispívá k lepšímu zhojení poranění.

Vysoce kvalitní materiály náplasti StopBac poskytují účinné a komfortní krytí rány. Náplast je šetrná k pokožce, prodyšná a poskytuje ideální přilnavost. Polštářek má značnou absorpční kapacitu a neuvolňuje do rány žádná vlákna. Aktivní zóna polštářku zajišťuje antibakteriální účinek po celou dobu aplikace, nezávisle potvrzený řadou testů.

Účel použití: Jednorázové ošetření – krytí drobných poranění i hlubších, špatně se hojících ran.

Návod k použití: Po důkladném vyčištění a desinfekci rány vyjměte z obalu, odstraňte krycí fólii a polštářek ihned přiložte na osušené postižené místo, upevněte k pokožce tlakem na náplast mimo poranění. Aktivní zóna polštářku by měla být v přímém kontaktu s poraněním, aby byla zajištěna jeho dlouhodobá ochrana s maximálním antibakteriálním účinkem. Po použití výrobek odložte do k tomu určených nádob.

Složení: Náplast i polštářek je vyrobeny z polymerní netkané textilie. Aktivní zóna polštářku je upravena patentovanou antibakteriální nanovrstvou obsahující stopová množství stříbra, které efektivně působí proti bakteriím v místě poranění a tím podporuje a urychluje hojení ran. Mírná barevná změna polštářku nemá vliv na funkci výrobku.

Rozměry a balení: Výrobek je dodáván v rozměrech 3 x 3 cm, 3 x 5 cm, 5 x 7,5 cm, 5 x 7,5 IV cm, 10 x 10 cm, 10 x 15 cm, 10 x 20 cm, 10 x 25 cm, 10 x 30 cm a v baleních po 1, 4, 20, 50 a 100 ks – viz obal (štítek).

Upozornění: V případě poškození nebo silného znečištění obalu výrobek nepoužívejte. Určeno k jednorázovému použití, neresterilizovat. Neužívat vnitřně, nepolykat. Nepoužívejte v případě alergie na stříbro. V případě alergické reakce přerušete užívání. Výrobek není určen k použití s léčivými a jinými zdravotnickými prostředky. Uchovávejte v suchu, mimo přímého slunečního záření a dosah zdrojů tepla. Doporučená teplota skladování je od 5 do 25°C. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Spotřebujte do: viz obal

Datum poslední revize návodu k použití: 08-2020

V případě dotazů či nahlášení nežádoucí příhody kontaktujte výrobce:



1014

Grade Medical s.r.o.

Mníšecká 500, 252 30 Řevnice

E-mail: hlaseni@stopbac.cz, web: <http://www.stopbac.cz>

Vyrobeno v České republice.

STERILEEO

Sterilní (ethylenoxid).

Čtete návod k použití

Nepoužívejte, pokud je obal poškozen.

Určeno k jednorázovému použití

Skladujte v suchu

Nevystavujte přímému slunečnímu záření.

Uchovávejte při teplotách od 5 do 25 °C.

Spotřebujte do (viz dno krabičky)

Číslo šarže

Neresterilizovat.